



Před bělením  
Po bělení

stupnice bělosti pro perio®



## Důležité informace

- Na začátku a na konci bělicí kúry si označte barvu zubů na stupnici bělosti.
- Během bělení omezte konzumaci tmavých jídel a nápojů na minimum, případně se snažte zabránit jejich kontaktu se zuby.
- Během doby bělení omezte nebo vynechte kouření. Nikotin je jednou z příčin mikroznečištění na zubech.
- Před bělením **nepoužívejte** mezizubní kartáčky ani zubní niť. Drobná poranění dásní by mohla způsobit jejich citlivost.
- Po bělení uchovávejte aplikátory v příložené krabičce.

## Upozornění

Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není určen osobám mladším 14 let, těhotným a kojícím ženám, lidem s jakýmkoliv problémy s dásněmi (krvácení, záněty, paradontóza) nebo při alergií na jakoukoliv složku výrobku. Pokud se během používání výrobku vyskytne citlivost dásní, zubů nebo jazyka, vypláchněte si ústa čistou vodou. Pokud problémy neustoupí, udělejte v používání výrobku přestávku, použijte ho každým druhým den nebo ho přestaňte používat úplně.

## Výrobce

VITAPRODUKT, s.r.o.  
Námestie sv. Egídia 95  
058 01 Poprad  
Made in Slovakia, EU.

## Distributor

Vitaprodukt Sp. z o.o.  
ul. Szlak 77/134  
31-153 Kraków, Poland.



[www.properio.com](http://www.properio.com)

# Triple action<sup>OXI+</sup>

VIDITELNÝ  
ZA 5  
DNÍ  
EFEKT

## pro perio® :teeth whitening system



oxidační  
bělení zubů



bezpečné  
pro zubní sklovinu



1

Připraví zubní sklovinu na bělení.



2

Aktivuje účinek bělicího gelu.



3

Aktivně bělí zubní sklovinu.

# pro perio® Triple action OXI+

## :systém na bělení zubů

properio® Triple action OXI+ je moderní přípravek určený k bělení zubů s použitím oxidační receptury OXI+. Obsahuje tři účinné gely iniciační :primer gel, aktivální :activating gel a bělicí :whitening gel. Iniciační :primer gel obsahuje aktivní bělicí látku PAP, která účinně odstraňuje skvrny nacházející se na povrchu zubní skloviny. Aktivální :activating gel a bělicí :whitening gel odstraňují zabarvení zubů uvnitř zubní skloviny způsobené dlouhodobým a pravidelným konzumováním zabarvujících jídel a nápojů nebo kouřením.

**Bělicí systém Triple action OXI+ poskytuje uživatelům tyto výhody:**

- **krátký čas aplikace na zuby – 10-20 minut\***
- **krátké trvání celé kúry - 5 dní\*\***
- **vyšoká účinnost - viditelný bělicí efekt\*\*\***
- **bezpečné bělení pro sklovinu a dásně**
- **jedinečné tvarovatelné aplikátory umožňující individuální přizpůsobení se zubům.**

\* Aplikace 10 minut postačuje pro slaběji zabarvené zuby. Pro silněji zabarvené zuby doporučujeme prodloužit dobu bělení na 20 minut.

\*\* Balení vystačí maximálně na 10 dní kúry při použití 2x denně. Délka ošetření závisí na individuálním posouzení očekávané úrovně bělení.

\*\*\* Pro většinu uživatelů je bělicí efekt viditelný už po 5 dnech.



## Návod na použití

### 1. Formování zubních aplikátorů

Balení obsahuje 2 aplikátory na horní a dolní zuby.

1. Přiveďte k varu vodu a chvíli počkejte, než zchladne (přibližně na 80 °C). Voda nesmí být vroucí, aby vám nepopálila ústa.
2. Uchopte držák aplikátoru, ponořte ho do horké vody na 5-10 sekund a počkejte, dokud aplikátor nezemkne. Po několika sekundách vyndejte zubní aplikátor z vody a chvíli počkejte, abyste si nepopálili ústa.

Upozornění: Příliš dlouhé ponechání aplikátoru v horké vodě ho může poškodit.

3. Změklý aplikátor si nasadte na horní zuby, skusněte a přitlačte prsty a jazykem ze všech stran. Po vytvarování si aplikátor vyjměte z úst a nechte ztvrdnout.
4. Vytvarovaný a ztvrdlý aplikátor si znovu vložte do úst a zkontrolujte, zda není příliš těsný nebo příliš dlouhý. Nepořádné nebo tlačící části a držák je možné odstříhnout.

TIP: Nasadte si aplikátor a před zrcadlem si na něj perem obkreslete čáru, která odděluje zuby od dásně. Poté aplikátor podle této čáry zastříhnete. Tímto způsobem získáte přesný otisk svých zubů, který se nebude dotýkat dásně.

5. Opakujte kroky 1-4 k vytvarování aplikátoru na dolní zuby.

### 2. Čištění zubů

:primer gel (tuba č. 1 s gelem)

1. Vymáčkněte malé množství :primer gelu na zubní kartáček. Doporučujeme použít měkký zubní kartáček.
2. Důkladně si vyčistěte zuby ze všech stran. Čištění zubů by mělo trvat 2 minuty.
3. Vypláchněte si ústa vodou.

### 3. Bělení zubů

:activating gel (nádobka č. 2 s gelem)

a :whitening gel (tuba č. 3 s gelem)

1. Do čistých a suchých aplikátorů vymáčkněte cca 1 ml (1 cm) :whitening gelu z tuby. Gel rovnoměrně rozetřete na vnitřní přední stranu aplikátoru (použijte například kávovou lžičku).

**Naplněné aplikátory zatím odložte stranou!**

2. Otevřete si nádobku s :activating gelem. Všechny zuby si důkladně natřete štětcem. Na pokrytí všech zubů je třeba několikrát namočit štětec do nádobky.

**Po natření se vyhněte kontaktu rtů se zuby.**

3. Připravené naplněné aplikátory s :whitening gelem si rychle nasadte na zuby.

### 4. Působení :whitening gelu

1. Aplikátory nechte působit na zubech po dobu 10-20 minut 1-2x denně.
2. Pokud je to nutné, setřete ubrouskem přebytečný gel vytékající z aplikátoru, nebo jej vyplivněte. Pozn.: Na jednu dávku stačí pouze malé množství gelu. Nadměrné množství gelu z aplikátoru vyteče.
3. Po ukončení doby bělení vyjměte aplikátory z úst. K odstranění přebytečného gelu ze zubů použijte čistý zubní kartáček a ústa vypláchněte vodou.
4. Nejezte a nepijte po dobu 30 minut po vykonání bělicí kúry, s výjimkou pití čisté vody.
5. Bělicí systém Triple action OXI+ používejte maximálně 10 dní. Po skončení kúry můžete další bělení zopakovat po 6 měsících.